

# AQUACEL™ Foam


Hydrofiber® penasta obloga



## Silikonska adhezivna:



## Neadhezivna:

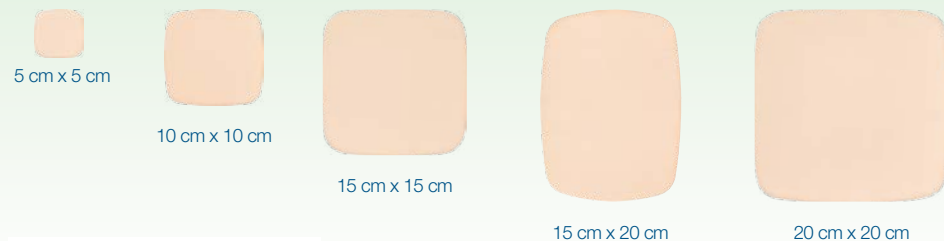

TM je zaštitni znak kompanije ConvaTec Inc. AQUACEL, AQUACEL logo, ConvaTec, ConvaTec logo, Hydrofiber i Hydrofiber logo su registrovani zaštitni znaci u USA, a Tried. True. Trusted. su zaštitni znaci kompanije ConvaTec Inc.

© 2012 ConvaTec Inc. AP-012007-MM.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo!

O indikacijama, riziku upotrebe i neželjenim dejstvima na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.



Sve što vam se dopada kod penastih obloga *i više od toga*



**Od sada** samo jedna obloga nudi komfor i jednostavnost primene pene uz dokazane osobine AQUACEL™ - sloja u zarastanju rana



# Uputstvo za upotrebu\*

## Standardna primena:

**AQUACEL™ foam obloga** se može koristiti kao primarna ili sekundarna obloga.

**Izaberite oblogu** onog oblika i veličine kod koje će centralni apsorventni deo (unutar adhezivnog okvira) biti veći za 1 cm nego što su ivice rane.

Obloga se može seći i oblikovati po potrebi. Ukoliko je adhezivna obloga isečena možete koristiti flaster kako bi je fiksirali na rani.

Za fiksiranje neadhezivne AQUACEL™ foam obloge koristite flaster ili neki drugi zavojni materijal.

**Izvadite oblogu** iz sterilnog pakovanja vodeći računa da što manje dodirujete prstima površinu koja će biti u kontaktu sa ranom kao i adhezivnu površinu. Zatim uklonite zaštitnu foliju sa adhezivnog dela obloge (ukoliko koristite adhezivnu oblogu).

**Držite oblogu** tako da sredina obloge bude usmerena preko sredine rane. Postavite oblogu direktno na ranu. Kod adhezivne obloge poravnajte adhezivne krajeve.

Ukoliko koristite neadhezivnu oblogu ili adhezivnu oblogu koja je isečena, odgovarajućim flasterom ili zavojem ih fiksirajte za ranu.



## Zamena obloge:

**Oblogu treba zameniti** kada je to klinički indikovano (npr. kada dođe do curenja, krvarenja, pojačanog bola, sumnje na infekciju). Maksimalno preporučeno vreme koliko bi obloga trebalo da stoji na rani je do 7 dana. Ranu treba ispirati u odgovarajućim vremenskim intervalima.

**Da bi skinuli oblogu sa rane**, pritisnite nežno kožu i pažljivo podignite jedan kraj obloge. Nastavite dok svi krajevi ne budu skinuti sa rane. Pažljivo podignite oblogu i odložite je u skladu sa kliničkim protokolom za odlaganje otpada.



## Regije za previjanje:

**Na delovima koji su anatomski nezgodni za previjanje**, kao što su sakralni deo ili peta mogu se koristiti obloge posebno oblikovane za te delove tela.

### Obloga za previjanje sakralnog dela:



1. Skinite zaštitnu foliju.
2. Držite prstima ivice obloge i presavijte je na pola tako da se presavijeni delovi dodiruju. Postavite presavijeni deo u interglutealnu brazdu.
3. Postavite centralni deo obloge na ranu, dobro poravnajte ivice obloge i zalepite je.

### Obloga za previjanje peta:



1. Skinite zaštitnu foliju.
2. Postavite gornji kraj obloge uz zadnji deo pete i zalepite.
3. Presavijte oblogu preko donjeg dela pete, poravnajte i dobro zalepite.

### Obloga za previjanje malih peta:



1. Izaberite odgovarajuću veličinu obloge oblika kvadrata. Nemojte uklanjati zaštitnu foliju. Isecite dva zarez dijagonalno, dužine oko 5 cm.
2. Zatim skinite zaštitnu foliju. Postavite gornji kraj obloge uz zadnji deo pete i zalepite.
3. Presavijte oblogu preko donjeg dela pete, poravnajte i dobro zalepite. Možete koristiti i flaster ili zavoj kako bi bolje fiksirali oblogu.

### Previjanje lakta, prstiju na rukama i nogama



Obloga se može seći na bilo koji oblik ili veličinu u zavisnosti od regije koja se previja. Možete koristiti i flaster ili zavoj kako bi bolje fiksirali oblogu.



**AQUACEL™ Dressings**  
TRIED, TRUE, TRUSTED.™

